

La ce ar trebui sa se astepte pacientii?

La un timp dupa aplicare, suportul exterior al PERIOPATCH® va putea fi indepartat de catre pacient. Gelul va ramane pe locul aplicat si va continua sa ofere protectie pentru pana la 6 ore. Pacientii vor remarka ameliorarea simptomatologiei asociate inflamatiilor locale, iritatiilor sau interventiilor chirurgicale.



mis | MAKE IT SIMPLE

PERIZONE™
PERIOPATCH® | Favorizeaza
vindecarea
plagilor orale

Ingredienti

Etilceluloza, acid poliacrilic, Sambucus nigra, ulei de ricin, guma arabica, metil hidroxipropil celuloza, glicerol, aroma de capsuni, Centella asiatica, dioxid de titan, Echinacea purpurea, polisorbat 80, Cl 77491

Ce este PERIZONE PERIOPATCH®?

PERIOPATCH® este un plastru unic si inovativ ce absoarbe exudatele la nivelul plagii favorizand vindecarea naturala prin formarea unei bariere protective la nivelul mucoasei orale sau gingivale inflamate. Bazat pe o formula unica, cu ingrediente naturale, validata prin cercetari clinice, plasturile cu hidrogel favorizeaza vindecarea si ameliorarea simptomatologiei in zonele afectate. Restabileste integritatea tisulara fara efecte secundare. Aplicat direct pe suprafata afectata, PERIOPATCH® adera pe zona de contact si asigura amelioarea durerii si vindecarea naturala, protejand impotriva iritatiilor cauzate de alimente si bauturi.



PERIOPATCH®

Cum functioneaza?

PERIZONE PERIOPATCH® este un plastru cu hidrogel care absoarbe secretele la nivelul plagilor exudative, izolandu-le de contactul cu agenti iritanti ce ar putea agrava plaga, imbunatatind confortul pacientului. Bariera fizica creata de PERIOPATCH® protejeaza mucoasa orala impotriva traumelor generate de aparate ortodontice, proteze si alte dispozitive intraorale, ameliorand simptomatologia si asigurand confortul pacientului in timpul fazei de vindecare precoce.

Recomandari de utilizare

In practica clinica, cea mai eficienta utilizare pentru cazurile standard a fost aplicarea a 3 plasturi in primele 24 de ore, urmata daca se considera necesar de alte 2 zile de intretinere, cu aplicatii la nevoie.



Cine ar trebui sa foloseasca PERIOPATCH®?

PERIOPATCH® ajuta in urmatoarele situatii:

- Gingii iritate (de exemplu dupa detaraj subgingival si planare radiculara), plagi, leziuni si ulceratii ale mucoasei gingivale si orale
- stomatite, leziuni minore, ulcere traumatiche
- leziuni provocate de aparate dentare si proteze
- traume asociate procedurilor stomatologice

Se pot folosi mai multi plasturi PERIOPATCH® in acelasi timp, pentru a proteja simultan mai multe zone afectate.

Mod de prezentare

PERIOPATCH® este furnizat stomatologilor in cutii cu 5 pachete pentru pacient. Fiecare pachet pentru pacient contine 6 plasturi PERIOPATCH® ambalati individual.